


My5-FU™ Sample Stabilizer Kit

Asiakaspalvelu:

Puhelin: +1 (610) 419-6731

Faksi: +1 (484) 547-0590

Sähköposti: Techsupport@saladax.com

MyCareTests.com

Käytettyjen symbolien selitys

IVD	<i>in vitro</i> -diagnostiikkalaite		Tutustu käyttöohjeisiin
REF	Luettelonumero		Viimeinen käyttöpäivä
LOT	Eräkoodi		Lämpötilarajoitus
	Valmistaja		Vakavat terveyshaitat
	Tulenarka		Terveyshaitat
CH REP	Valtuutettu edustaja Sveitsissä		
EC REP	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä		


 Saladax Biomedical, Inc.
 116 Research Drive
 Bethlehem, PA 18015
 USA

EMERGO EUROPE
 Westervoortsewijk 60,
 6827 AT Arnhem
 The Netherlands

 Casus Switzerland GmbH
 Hinterbergstrasse 49
 6312 Steinhausen
 Switzerland

Käyttötarkoitus

Saladax My5-FU Sample Stabilizer Kit on tarkoitettu 5-fluorourasiilin vakauttamiseen verinäytteissä, jotka on otettu analysoitaviksi My5-FU Assay. Sample Stabilizer Kit on tarkoitettu takaamaan näytteen eheys näytteenotosta analyysiin.

Sisältö

My5-FU Sample Stabilizer Kit kuuluvat seuraavat:

- My5-FU Sample Stabilizer (0,1 ml), sisältää 0,12 mg/ml gimerasiilia 30-prosenttisessä metanoliliuoksessa
- BD Vacutainer® Blood Transfer Device

Muut tarvittavat laitteet (ei toimitettu)

EDTA- tai hepariiniputki veren ottamiseen (≥ 2 ml).

Säilytys ja varastointiaika

Säilytä My5-FU Sample Stabilizer Kit huoneenlämmössä. Ohjeiden mukaan säilytettyinä My5-FU Sample Stabilizer Kit on vakaa viimeiseen käyttöpäivään saakka.

Varoitukset ja varotoimet

In vitro -diagnostiikkakäyttöön.

Käsittele teräviä esineitä (neula) ja hävitä ne sovellettavien määräysten mukaisesti.

Menettelyn rajoitukset

My5-FU Assay näytteiden eheys ja tarkat tulokset ovat riippuvaisia My5-FU Sample Stabilizer Kit oikeanlaisesta säilytyksestä ja hyvästä laboratoriotekniikasta.

ÄLÄ aseta näytettä jäälle äläkä laita näytettä jääkaappiin, kun verinäyte on otettu ja näytteenottoputkeen on lisätty tuotteen mukana toimitettu stabilointiaine. Tämä voi lisätä hemolyysin aiheuttamia häiriöitä, jotka aiheuttavat virheellisiä 5-FU-tuloksia.

Käyttöohjeet

- Katso testin täydellinen yhteenveto ja selitys Saladax My5-FU Assay pakkausselosteesta.
- OTA ≥ 2 ML VERTA EDTA- tai hepariiniputkeen perifeerisestä portista tai laskimosta.
 - **ÄLÄ** käytä plasman erotteluputkia.
 - **ÄLÄ** ota näytettä lääkeinfuusioportista.
 - **ÄLÄ** ota vajaata näytettä.
- INJEKTOI TOIMITETTU STABILOINTIAINE NÄYTEPUTKEEN välittömästi näytteenoton jälkeen ja käännä putki varovasti ympäri 3 kertaa. SENTRIFUGOI NÄYTE 24 TUNNIN kuluessa näytteenotosta.
 - **ÄLÄ** aseta näytettä jäälle **ÄLÄKÄ** laita sitä jääkaappiin, kun käytät stabilointiainetta.
 - **ÄLÄ** testaa näytteitä, joita ei ole käsitelty stabilointiaineella.
 - **ÄLÄ** testaa näytteitä, joita ei ole sentrifugoitu 24 tunnin kuluessa.
- EROTA PLASMA VAROVASTI putken yläosasta välttämättä solukerrosta ja siirrä se korkilliseen sekundääriseen putkeen. Plasmassa ei saa olla soluja. Säilytä plasmanäytettä 2–8 °C:n lämpötilassa tai huoneenlämmössä enintään viikon ajan tai pakasta (≤ -20 °C), jos näytettä säilytetään pidempään.
- NÄYTE VOIDAAN KULJETTAA HUONEENLÄMPÖTILASSA. Ilmoita laboratoriolle infuusion aloitus- ja lopetusajat.